

**Bedienungsanleitung
und
Dokumentation zum**

Badlift

Toilettenlift

VEB Saalfelder Hebezeugbau

6800 Saalfeld/Saale

Straße der Freiheit 1 - Postfach 363

Betrieb des VEB Schwermaschinenbaukombinat TAKRAF

Deutsche Demokratische Republik



Badlift

Bedienanleitung

Vor Inbetriebnahme des Bad- und Toilettenliftes hat sich die Bedienperson davon zu überzeugen, ob sich der Lift in einem funktionsbereiten und betriebs-sicheren Zustand befindet. Das betrifft die Standsicherheit sowie den festen Sitz des Gestänges. Die Endschalter sind auf Funktion zu überprüfen. An den Endschaltern dürfen keine Veränderungen vorgenommen werden. Das Gestänge hat in jedem Fall arretiert zu sein:

- beim Besetzen bzw. Verlassen des Liftes
- beim Heben bzw. Senken von Personen
- bei der Benutzung von Bad und Toilette

Das Gerät ist nach Benutzung durch Ziehen des Netzsteckers vom Netz zu trennen. Der Schwenkarm ist zu arretieren. In periodischen Abständen sind alle von außen zugänglichen Schrauben und Muttern auf ihren festen Sitz zu überprüfen.

